





Mode d'emploi pour le transport des prélèvements congelés

Afin que vos prélèvements arrivent congelés au laboratoire, nous conseillons la procédure suivante :

CONGELER

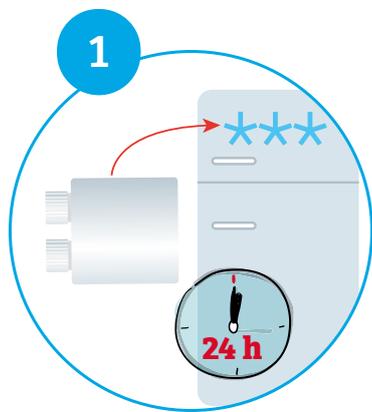


Déposer horizontalement le récipient vide dans le congélateur durant min. 24 heures.

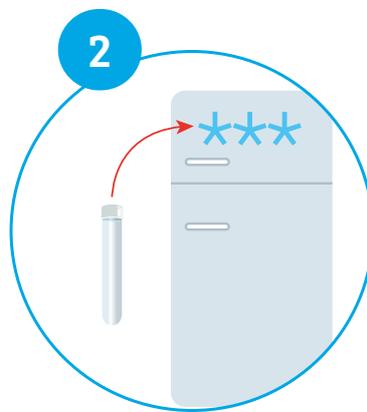


Déposer verticalement le prélèvement dans le congélateur. (Attention, il est indispensable de centrifuger le sang complet et de congeler uniquement le sérum ou le plasma !)


JUSTE AVANT DE TRANSMETTRE AU COURSIER

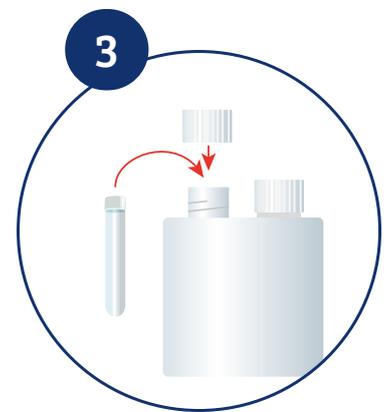

Mettre le prélèvement congelé dans le conteneur réfrigéré.

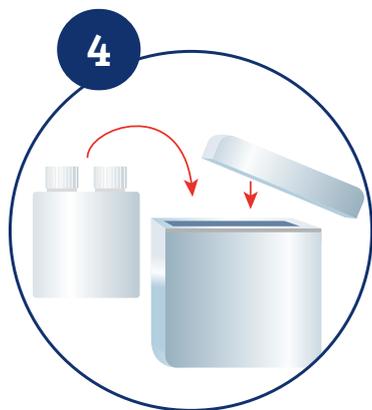

Puis placer le récipient dans une boîte en polystyrène.

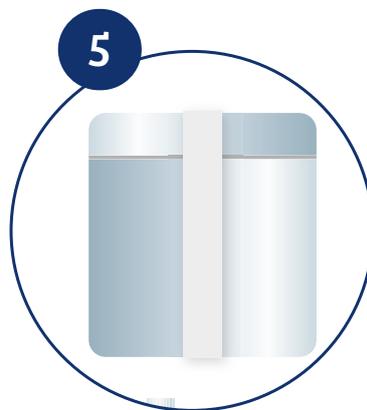

Fixer le couvercle avec un élastique.



Mettre la boîte en polystyrène et le bon de demande dans un sac d'expédition.